


ENVASE IMPLANTES con pilar multifunción



1. Abrir el tapón de rosca del envase del implante en sentido antihorario.



2. El envase dispone de un opérculo de aluminio que hay que retirar mediante una pequeña solapa.

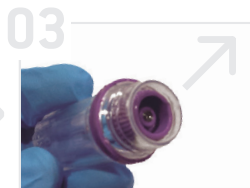

3. Una vez retirado el opérculo, extraer el envase del implante. El tapón de plástico contiene el tornillo de cierre.



4. Extraer el tapón de plástico del envase interno.



5. A continuación, el implante se podrá retirar con la llave manual para pilares multifunción.



6. También es posible la extracción del implante con la llave de contra-ángulo para pilares multifunción.

Instrucciones de uso
ENVASE IMPLANTES
con pilar multifunción


MICRODENT
IMPLANT SYSTEM