

ENVASE IMPLANTES sin transportador




1. Abrir el tapón de rosca del envase del implante en sentido antihorario.



2. El envase dispone de un opérculo de aluminio que hay que retirar mediante una pequeña solapa.



3. Una vez retirado el opérculo, extraer el envase del implante. El tapón de plástico contiene el tornillo de cierre.

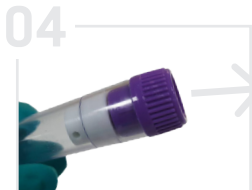

4. Extraer el tapón de plástico del envase interno.



5. Una vez extraído el tapón el implante está listo para la extracción.



6. A continuación, el implante se podrá retirar con la llave directa a implante, conectada al contra-ángulo.

Instrucciones de uso
ENVASE IMPLANTES
sin transportador



MICRODENT
IMPLANT SYSTEM