

Para a correta utilização dos nossos produtos, recomenda-se que os profissionais recebam formação específica sobre as suas aplicações. A Implant Microdent System S.L.U. organiza regularmente cursos de formação que fornecem informações sobre as características de cada componente protético e solução de suporte CAD/CAM, bem como a sua correta aplicação técnica. Esta informação está também disponível no website da empresa, www.microdentsystem.com, e nas nossas diversas publicações técnicas.

INDICAÇÕES

A Implant Microdent System S.L.U. oferece os produtos necessários para a aplicação e utilização dos seus sistemas de reabilitação protética e soluções digitais.

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Para a seleção adequada do produto, recomendamos a consulta dos nossos catálogos técnicos. Os componentes protéticos e o suporte digital oferecidos pela Implant Microdent System S.L.U. são fabricados em aço inoxidável, titânio de alta resistência e polímero de alta resistência (POM).

APRESENTAÇÃO DO PRODUTO

A Implant Microdent System S.L.U. garante que todos os seus produtos passam por um processo controlado de fabrico, inspeção e limpeza antes do embalamento. Os produtos estão disponíveis em diversas opções de embalagem, cada uma claramente identificada com a sua respetiva etiqueta técnica.

Condições de Entrega do Produto







Os produtos protéticos Microdent são fornecidos limpos, mas não estéreis. Caso o fluxo de trabalho técnico exija desinfeção ou limpeza profunda antes da utilização no processo protético, recomenda-se seguir os protocolos laboratoriais padrão.

Se for necessário um processo de limpeza térmica devido às exigências do fluxo de trabalho, devem ser tidas em conta as características específicas do equipamento utilizado. Como referência técnica para materiais termoplásticos e metálicos, os parâmetros de resistência térmica são:

- Temperatura máxima: 134°C
- Tempo de exposição: 3 minutos

SÍMBOLOS DE ROTULAGEM

O rótulo contém as seguintes indicações, consoante o tipo de produto:

	Número de referencia
	Respeitar as instruções de utilização.
	Número de lote
	Precaução, consultar advertências.
	Fabricante
	Código identificador único.

ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES

Os produtos Microdent fazem parte de um conceito abrangente, concebido para compatibilidade com os sistemas Implant Microdent System S.L.U. A utilização de componentes que não sejam Microdent pode resultar num desempenho abaixo do ideal.

Os produtos devem ser utilizados exclusivamente para o fim a que se destinam. Os operadores ou utilizadores que manuseiam estes produtos devem estar cientes do risco de sensibilidade aos materiais descrito na secção "DESCRIÇÃO DO PRODUTO".

Antes da utilização, é da responsabilidade do técnico profissional verificar:

- O estado da embalagem e se o número de referência corresponde ao produto necessário para o trabalho protético.
- A integridade do produto para verificar se está em ótimas condições.
- Manutenção e limpeza:
- Para a correta conservação do produto, devem ser seguidas as seguintes instruções:
- Não utilize agentes de limpeza ou desinfetantes à base de cloro ou ácido.
- Evite produtos que contenham aldeídos.
- Remova completamente qualquer resíduo da superfície ou do interior do produto utilizando uma escova de cerdas de nylon.
- Para produtos com arestas ou zonas de ajuste, evite impactos ou o contacto com outros elementos que possam danificar a superfície ou as arestas de corte.
- Após a limpeza, enxague com água destilada e seque completamente. A secagem inadequada pode provocar manchas de oxidação na superfície.

Os produtos não médicos estão sujeitos a desgaste pelo uso. É da responsabilidade do utilizador substituir periodicamente estes produtos para garantir a precisão dos ajustes protéticos. A Implant Microdent System S.L.U. recomenda ter sempre unidades de substituição disponíveis.

RESPONSABILIDADES, SEGURANÇA E GARANTIA

Caso a embalagem ou o produto sejam danificados durante o transporte, a Implant Microdent System S.L.U. fará a substituição gratuita. A prova de manuseamento inadequado do produto isenta a empresa da responsabilidade mencionada.

A garantia aplica-se aos produtos da Implant Microdent System S.L.U. desde que tenham sido utilizados de acordo com as instruções de utilização e recomendações técnicas fornecidas. Para a devolução dos produtos mencionados nestas instruções, deverão ser seguidos os procedimentos estabelecidos nos nossos termos e condições de venda e entrega.

Qualquer anomalia técnica deve ser cuidadosamente analisada para determinar a sua origem e eventuais desvios no resultado do trabalho, devendo ser devidamente documentada.

Fabricante: Implant Microdent System S.L.
Pol. Ind. Can Magre C/. Carles Buigas, 1
08187 Sta. Eulàlia de Ronçana (Barcelona)